

# MARQUARDT MEDIZINISCHE GESICHTSMASKE



## HAUPTMERKMALE

- CE Kennzeichnung
- EN14683:2019+AC:2019 – medizinische Gesichtsmaske TYP IIR
- Integrierter, anpassbarer und langlebiger Nasenbügel
- Auf Hautverträglichkeit getestete Bänder

## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

### Äußere & innere Vliesstoffe:

- PP Spinnvlies
- PET / PP Vliesstoff für erhöhten Tragekomfort

### Filterschicht:

- PP schmelzgeblasenes Vlies

### Nasenbügel:

- HDPE-beschichteter verzinkter Draht, Drahtdicke 0.5 mm

### Elastisches Band:

- Polyamid / Elastan Gummibänder

## BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG


Die medizinische Gesichtsmaske dient dem Fremdschutz, bedeckt Mund und Nase und stellt eine Barriere dar, um die direkte Übertragung infektiöser Tröpfchen zwischen Personal und Patienten zu minimieren. Des Weiteren kann die Maske im nicht medizinischen Bereich getragen werden, um das Risiko einer Infektionsverbreitung zu verringern. Das Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

## WARNUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt korrekt angelegt ist.
- Entsorgen Sie die Maske am Ende einer Schicht. Der Maskenkörper sollte nicht mit den Händen berührt werden.
- Nach dem Abnehmen der Maske sollten die Hände gewaschen oder desinfiziert werden.
- Der Maskenträger ist nicht gegen infektiöse Keime geschützt.

## ZULASSUNGEN UND STANDARDS

- Medizinische Filterhalbmaske nach EN 14683 Typ IIR
- Bakterienfiltrationseffizienz  $\geq 98\%$

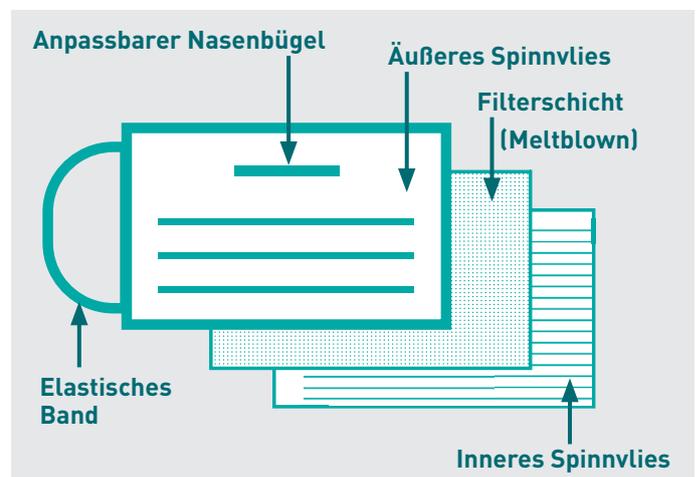

## ZEITLICHE NUTZUNGSBESCHRÄNKUNG

Einmaliger Gebrauch, maximal eine Schicht

## HALTBARKEIT UND LAGERUNG

- Die Gesichtsmaske hat eine Lagerdauer von 2 Jahren in Originalverpackung.
- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass das Produkt noch innerhalb der Lagerdauer liegt. Das Produkt sollte sauber, trocken und im Temperaturbereich von  $-20\text{ °C}$  und  $+40\text{ °C}$  bei einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit von  $60\%$  gelagert werden.
- Für Lagerung und Transport die Originalverpackung verwenden

